

Vedligehold af polstring

Tofi Patientstol **ILLUSION**



Indholdsfortegnelse:

1. Illusions egenskaber
2. Generelt
3. Vigtigt at vide
4. Anbefalinger og fremgangsmåde
5. Varenumre på Tofi Cleaner produkter

1. Illusions egenskaber

Illusion er en meget stærk type kunstskind der kan tåle aftørring med sprit.

Den tåler generelt flere typer af rengørings – og desinfektionsmidler end noget andet kunstskind på markedet. Det er dog vigtigt at man følger anvisningerne i denne vejledning, for at passe bedst muligt på polstringen, så du forlænger levetiden på skindet.

Illusion er meget strækbar, og denne egenskab gør at polstringen bliver mere blød og komfortabel sammenlignet med fx Stamskin.

Skindet er gennemfarvet. Små ridser, der evt. måtte komme pga. brug af skarpe redskaber, ses derfor ikke så nemt. Sammenlignet med Stamskin, er blødheden i Illusion yderligere en fordel i forhold til hvor nemt man får lavet dybere ridser i skindet.

BEMÆRK! Det er på ingen måde lavet til at modstå ridser!

Illusion er blevet testet i brug. Selvom man ikke kan sige at skindet er åndbart, så har man via test kunne konstatere at komforten er meget høj da kropsvarmen transmitteres væk.

2. Generelt

Tofistolen har ingen syninger og ingen skidtsamler omkring polstringerne. Dette sikrer en god hygiejne og meget nem rengøring.

Anbefalingerne i denne vejledning omhandler den bedste rengøring af polstringen, og tager ikke hensyn til eventuelle, for branchen, gældende regler vedrørende hygiejne. Er polstringen blevet misfarvet, kan dette IKKE fjernes mekanisk eller med stærke midler. Ethvert forsøg vil resultere i en forringelse af skindets overflade. Vi anbefaler derfor at der vælges en mørk farve hvor afsmitning ikke vil kunne ses.

3. Vigtigt at vide

**NB! De følgende anvisninger gælder KUN for Illusion!
Dette kunstskind er særligt produceret til at kunne klare skrappere midler end andre mærker på markedet. Derfor bør ingen af de følgende anvisninger, benyttes på andre typer kunstskind.**

1. Aftørring med vand efter påføring af sprit er ikke en nødvendighed. Alle produkter efterlader imidlertid en hinde på skindet. Det gør sprit også og derfor kan det være en god idé at tørre efter med en klud, fugtet med vand.
2. Visse midler behøver ikke eftertørring med vand, men vi anbefaler at der altid tørres efter med vand af hensyn til skindets holdbarhed. (Tofi Cleaner Spray / Wipes behøver ikke tørres efter)
3. Visse typer af rengøringsmidler kan misfarve skindet, derfor anbefales det at være omhyggelig, med at undersøge det produkt man påtænker at benytte, inden anvendelse. Misfarvningen der evt. kan opstå, vil dog udelukkende være af kosmetisk betydning.
4. Datablad med fuld oversigt over hvilke produkter der kan anvendes, og i hvilken opløsning, kan sendes separat på mail hvis det ønskes. Skriv til os på mail kontakt@bccteknik.dk

4. Anbefalinger og fremgangsmåde

1. Tør stolen af med Tofi Cleaner Wipes, sprit eller anden desinfektionsmiddel mellem hver patient.
2. Når dagens arbejde er slut anbefaler vi, at du benytter Tofi Cleaner Spray til at rense skindet grundigt med.

Fremgangsmåde for Tofi Cleaner Spray:

1. Spray på
2. Lad virke i 2-3 min.
3. Arbejd i cirkelbevægelser med den medfølgende svamp
4. Tør efter med en klud

Tofi Cleaner Spray fjerner ATP, bakterier og deaktiverer vira!
Læs meget mere om de effektive produkter på linket herunder:



<https://tofistol.dk/toficleaner-produkter/>

5. Varenumre til bestilling af Tofi Cleaner produkter

Tofi Cleaner Spray
Varenr.:45-705001

Tofi Cleaner Wipes
Varenr.: 45-808001

Tofi Cleaner Wipes
45-808002

Vægdispenser
Varenr.: 45-808080

Rengøringsvampe
Varenr.: 45-601005

Klude
Varenr.: 45-602005

